

182613

※ 본 제품은 일회용 의료기기임, 재사용 금지

1. 제조회사 및 제조국가
Vitrex Medical A/S
(Vasekær 6-8, DK-2730, Herlev, Denmark) (덴마크)
2. 수입업자 상호 및 주소
(주)피오씨코리아
서울시 금천구 디지털로 121, 1501호
3. 사용목적
모세관 현상을 이용하여 혈액을 채취하는 가는 튜브 모양의 기구
4. 보관 또는 저장방법
직사광선을 피해 보관
5. 사용 전 준비사항
(가) 튜브는 반드시 용기안에 보관되어야 하며 깨끗한 장소에 실온 보관한다.
(나) 유효기한을 확인하여 유효기한이 지난 제품은 사용하지 않고 폐기한다.
(다) 채혈 전 채혈 부위를 소독한다.
6. 사용 방법
(가) 천자침(별도 제품) 또는 주사침(별도 제품)을 이용하여 채혈 부위를 찌른다.
(나) 처음에 배어 나오는 혈액은 깨끗한 거즈로 닦아낸다.
(다) 채혈 튜브를 수평으로 채혈부위에 맞힌 혈액에 가져다 댄다.
(라) 모세관현상에 의해 채혈이 진행되면 필요한 양의 혈액이 담길 때까지 기다린다.
7. 사용 후 보관 및 관리 방법
(가) 사용 후에는 감염성 의료폐기물로 분리하여 버린다.
(나) 재사용하지 않는다.
8. 사용 시 주의 사항
(가) 감염방지를 위하여 검사용 고무장갑을 착용한다.
(나) 부적절 샘플이 일어나지 않도록 채혈 부위를 쥐어짜지 않는다.
(다) 채혈 튜브를 기울이면 혈액이 흘러나올 수 있으니 주의한다.
9. 부작용보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)